

INDICAID®


PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENO DE COVID-19



INDICAID® es un dispositivo diagnóstico rápido, no invasivo para usar en el punto de atención. Constituye el método más sencillo, rápido y económico de detección de antígenos SARS-Cov-2 en las personas. La portabilidad de INDICAID®, su fácil uso, la posibilidad de autorrecolectar la muestra y de realizar pruebas por lotes hacen que sea una de las formas más eficaces de realizar pruebas masivas en la población.


MÉTODO DE USO

01

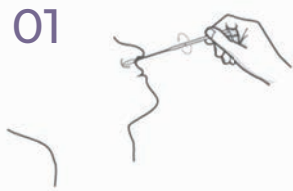


Hisope suavemente para recolectar la muestra

02

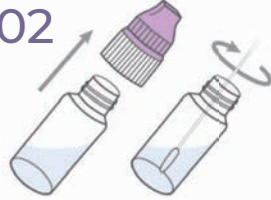

Inserte el hisopo y agite

03

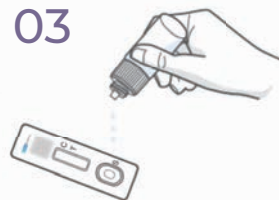

Coloque la muestra en el dispositivo de análisis

04



Positivo

Negativo

Inválido

Lea el resultado

INDICAID® VENTAJAS

■ FÁCIL DE USAR

- INDICAID es fácil de usar, no requiere capacitación ni equipo especial

■ RESULTADO RÁPIDO

- Podrá leer los resultados en solo 20 minutos

■ APROBADA

- Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de la FDA de EE.UU. y mercado CE

■ SENCILLA DE USAR


- La autorrecolección de muestras nasales poco profundas es un proceso intuitivo.

■ CONVENIENTE

- Permite la recolección de muestras por lotes y la realización de pruebas masivas.

RECOLECCIÓN POR LOTES Y PRUEBAS MASIVAS

Las ventajas que ofrece INDICAID® con respecto a la competencia incluyen la practicidad de la autorrecolección, la comodidad del hisopado nasal anterior y la posibilidad de recolección por lotes y realización de pruebas masivas, hasta dos (2) horas después de la toma de muestras.

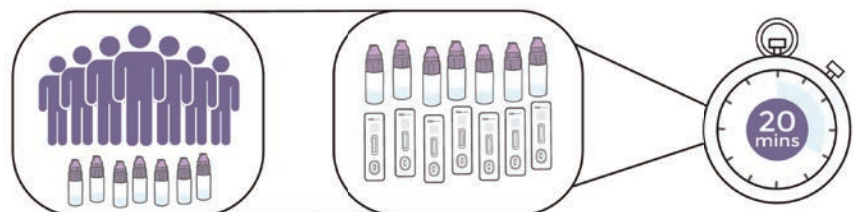

Recolección

Análisis

INDICAID® les brinda tranquilidad a usted y a su equipo.

DESEMPEÑO CLÍNICO

La FDA de EE.UU. anunció recientemente la aprobación del uso de emergencia (EUA) de la Prueba Rápida de Antígeno de COVID-19 INDICAID® para satisfacer la necesidad de realizar pruebas en serie en personas asintomáticas. La actualización amplía el uso de INDICAID® como prueba de tamizaje, por lo que brinda una nueva opción precisa y confiable para las escuelas, los centros de trabajo y las comunidades.

“Rompe el mito de que las pruebas de antígenos solo detectan el virus en pacientes con síntomas, y demuestra que las pruebas de antígenos de alta calidad pueden ser sensibles, precisas y confiables para realizar pruebas de tamizaje en la población.”

* Se evalúa en forma continua el rendimiento del producto frente a las nuevas variantes.

Sensibilidad (PoC) – 89.1 %
(Boletín técnico disponible para quien lo solicite)

CONTROLES DE CALIDAD

Con estos controles los usuarios se aseguran de que el desempeño del dispositivo concuerde con las especificaciones del producto.

Controles de Calidad con Líquidos Externos: elaborado específicamente para garantizar que los reactivos y materiales de la prueba funcionan y que el procedimiento de la prueba se realiza correctamente.

Muestras de Control Positivas y Negativas: deben realizarse una vez con cada nuevo lote, cada nuevo envío y cada nuevo usuario, empleando el procedimiento de análisis proporcionado.

Se deben respetar los requisitos de control de calidad indicados por la normativas local, estatal y federal o los requisitos de acreditación, así como con los procedimientos estándar de control de calidad del propio laboratorio.

PRECIO/EMBALAJE DE LOS CONTROLES

\$50 for:

- 5 x 250 Controles COVID-19 Antigen **Positivos** de Antígeno COVID-19 de un solo uso.
- 5 x 250 Controles COVID-19 Antigen **Negativos** de Antígeno COVID-19 de un solo uso.

COSTOS DE ENVÍO ADICIONALES DIRIJA SU ORDEN DE COMPRA A:

PHASE Diagnostics, Inc.
DBA PHASE Scientific Americas
10527 Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92543

PRUEBA RÁPIDA INDICAID (PoC) EMBALAJE Y ENVÍO


FORMATO	NÚM. DE CAJAS	NÚM. DE PRUEBAS
CAJA UNITARIA	1	25
CAJA GRANDE	18	450
PALLET	360	9000

FORMATO	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	PESO (cm)
CAJA UNITARIA	22.86	16.63	8.25	0.43
CAJA GRANDE	52.07	47.75	25.4	8
PALLET	104.14	100.33	146.05	172.2

INDICAID®

LAS PRUEBAS RÁPIDAS INDICAID ESTÁN DISPONIBLES EN PRESENTACIÓN DE 25 PRUEBAS

Si le preocupa su bienestar en el lugar de trabajo, la cuidar a su familia en casa o monitorear pacientes cuando regresan a casa, el uso de INDICAID® en su presentación de 2 y 12 pruebas diagnósticas para detectar COVID-19 es una excelente manera de garantizar la seguridad de la población, familias y pacientes mientras viven sus vidas en la pandemia.

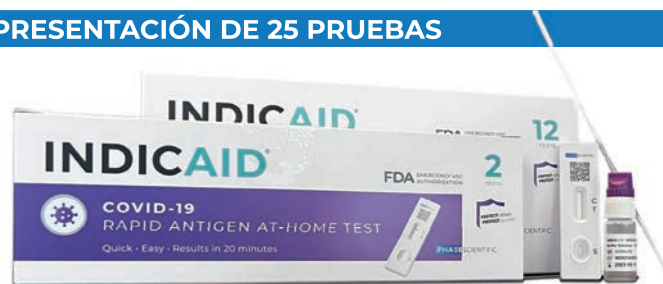

ACERCA DE PHASE Scientific

PHASE Scientific es una empresa de biotecnología de alto crecimiento fundada por bioingenieros de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). Creamos herramientas que empoderan a las personas para brindarles más y mejor información sobre su salud.

- 1.877.878.6610
- ussales@phasesci.com
- PhaseScientificAmericas.com

PHASESCIENTIFIC

Inspiramos un nuevo estado de salud